

UltraSonicWaves

AESTHETIC ULTRASOUND



ITALIANO

Programmi per l'uso **estetico** e **benessere**

CE

MESIS

Rev. 4/2025

Gentile Cliente,
ci congratuliamo con Lei per la scelta effettuata. Ha ora a sua disposizione un prodotto dalle grandi prestazioni, costruito secondo le più recenti e severe normative europee, e in grado di garantire un elevato standard di qualità e di sicurezza. La preghiamo di prestare molta attenzione a questo manuale leggendolo in ogni sua parte al fine di familiarizzare con l'apparecchio.

INDICE

INFORMAZIONI ED ASSISTENZA	3
PROGRAMMI ESTETICA E BENESSERE	4
PROGRAMMI ESTETICA E BENESSERE SPECIFICHE	8

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, copiata o divulgata con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta di HSD S.r.l. Eventuali infrazioni saranno perseguite nei modi e nei tempi previsti dalla Legge. Tutti i nomi ed i marchi citati in questo manuale appartengono ai rispettivi proprietari.

© 2025 HSD S.r.l. RSM
Edizione Aprile 2025 - Rel. 0.0

INFORMAZIONI ED ASSISTENZA

assistenzatecnica@mesis.eu
www.mesis.eu

DISTRIBUTORE:
VIMA S.R.L.
VIA CONDOVE 11
10129, TORINO, ITALY
assistenzatecnica@mesis.eu
www.mesis.eu

FABBRICANTE:
HSD S.R.L.
STRADA ACQUASALATA,
11 - INT. 6 - 47899
SERRAVALLE RSM
info@hds.sm

PROGRAMMI ESTETICA E BENESSERE

Note applicative per utilizzare correttamente l'apparecchio, sapendo quale programma scegliere e l'azione che esso svolge, combattendo così il proprio inestetismo il più efficacemente possibile.

URTO		LEVIGANTE	
AZIONE	L'irradiazione ultrasonora in questa azione determina un massaggio di notevole intensità, che per mezzo delle oscillazioni penetra più in profondità nell'epidermide.	AZIONE	Richiama il plasma pulito in tutto lo spessore del derma e ridona la giusta dimensione fisiologica al connettivo cutaneo, migliorando sia l'elasticità che l'irregolarità superficiale della epidermide.
QUANDO	Va utilizzato in tutti quegli stadi avanzati di cellulite localizzata, specialmente nel caso di cellulite molle o flaccida.	QUANDO	È indicato in tutti quegli inestetismi cellulitici, nei quali la superficie cutanea presenta delle irregolarità, come la classica "Pelle a buccia d'arancia" e "Pelle Ruvida".
MODELLANTE		DRENANTE	
AZIONE	Questa terapia viene utilizzata ampiamente nei casi di lipodistrofie localizzate rompendo il tessuto fibronico presente che ostacola la circolazione sia ematica che linfatica.	AZIONE	La sua azione benefica facilita il drenaggio dei connettori linfatici e delle rispettive stazioni ghiandolari annesse, facilitando il riassorbimento dei liquidi.
QUANDO	Beneficiando della sua caratteristica nel modellare e stimolare è particolarmente indicato nel caso di cellulite dura o solida.	QUANDO	Beneficiando della sua azione drenante, è consigliato nel caso di cellulite edematosa, essendo i liquidi la principale causa, anch'esso consigliato contro la Pelle a buccia d'arancia.
MANTENIMENTO		RIATTIVANTE	
AZIONE	Il suo effetto di stimolazione sulla circolazione sanguigna distrettuale, migliora il trofismo cutaneo e l'ossigenazione cellulare, liberando i liquidi in eccesso e le tossine dal connettivo sottocutaneo.	AZIONE	Stimola e riattiva la circolazione sanguigna e linfatica per un miglioramento cutaneo, riattivando il metabolismo cellulare, favorendo lo scambio di liquidi tra le cellule.
QUANDO	È indicato come mantenimento del ciclo di sedute svolte, per non perdere i risultati raggiunti.	QUANDO	È indicato soprattutto negli stadi iniziali della cellulite, in quanto stimola e riattiva il metabolismo as-sopitosi.
VEICOLANTE		MASSAGGIO PER IL VISO	
AZIONE	Favorisce la penetrazione di creme, gel o altri prodotti nel tessuto biologico, favorendone l'assorbimento e quindi il loro effetto, indicato anche per trattamenti depilatori.	AZIONE	Incrementa l'elasticità e il tono dei tessuti riducendo la possibile formazione di cicatrici post acne e aumenta l'effetto di prodotti antiacne. Il trattamento va eseguito una volta al giorno.

ESFOLIANTE PER IL VISO		LEVIGANTE PER IL VISO	
AZIONE	Riattiva la circolazione e favorisce il ricambio cellulare: la pelle viene purificata in profondità e preparata ad assorbire meglio i principi attivi di creme idratanti e antirughe. L'azione esfoliante ha effetti benefici anche sui punti neri che con le onde ultrasoniche si riducono o addirittura scompaiono. Il trattamento va eseguito una volta al giorno.	AZIONE	Leviga e distende le rughe e se usato in maniera preventiva può ritardare l'invecchiamento della pelle o impedire che si aggravi. L'ultrasuono grazie ai suoi effetti termici, riscalda i tessuti e favorisce processi biochimici e metabolici. Il trattamento va eseguito una volta al giorno.

N° PROGRAMMA -TRATTAMENTO		N° PROGRAMMA -TRATTAMENTO		N° PROGRAMMA -TRATTAMENTO	
1	CELLULITE GLUTEI	31	ADDOME URTO	63	GINOCCHIA MANTENIMENTO
2	# CELLULITE GLUTEI	32	ADDOME MODELLANTE	64	# GINOCCHIA URTO
3	CELLULITE ADDOME	33	ADDOME MANTENIMENTO	65	# GINOCCHIA MODELLANTE
4	# CELLULITE ADDOME	34	# ADDOME URTO	66	# GINOCCHIA MANTENIMENTO
5	CELLULITE ARTI INFERIORI	35	# ADDOME MODELLANTE	67	INTERNO GINOCCHIA URTO
6	# CELLULITE ARTI INFERIORI	36	# ADDOME MANTENIMENTO	68	INTERNO GINOCCHIA MODELLANTE
7	CELLULITE ARTI SUPERIORI	37	CULOTTES CHEVAL URTO	69	INTERNO GINOCCHIA MANTENIMENTO
8	# CELLULITE ARTI SUPERIORI	38	CULOTTES CHEVAL MODELLANTE	70	# INTERNO GINOCCHIA URTO
9	TESSUTO ADIPOSO	39	CULOTTES CHEVAL MANTENIMENTO	71	# INTERNO GINOCCHIA MODELLANTE
10	# TESSUTO ADIPOSO	40	# CULOTTES CHEVAL URTO	72	# INTERNO GINOCCHIA MANTENIMENTO
11	TONIFICAZIONE TESSUTI	41	# CULOTTES CHEVAL MODELLANTE	73	POLPACCI URTO
12	# TONIFICAZIONE TESSUTI	42	# CULOTTES CHEVAL MANTENIMENTO	74	POLPACCI MODELLANTE
13	ESTERNO BRACCIA URTO	43	GLUTEI URTO	75	POLPACCI MANTENIMENTO
14	ESTERNO BRACCIA MODELLANTE	44	GLUTEI MODELLANTE	76	# POLPACCI URTO
15	ESTERNO BRACCIA MANTENIMENTO	45	GLUTEI MANTENIMENTO	77	# POLPACCI MODELLANTE
16	# ESTERNO BRACCIA URTO	46	# GLUTEI URTO	78	# POLPACCI MANTENIMENTO
17	# ESTERNO BRACCIA MODELLANTE	47	# GLUTEI MODELLANTE	79	PELLE BUCCIA D'ARANCIA DRENANTE
18	# ESTERNO BRACCIA MANTENIMENTO	48	# GLUTEI MANTENIMENTO	80	PELLE BUCCIA D'ARANCIA LEVIGANTE
19	INTERNO BRACCIA URTO	49	ESTERNO COSCE URTO	81	PELLE BUCCIA D'ARANCIA MANTENIMENTO
20	INTERNO BRACCIA MODELLANTE	50	ESTERNO COSCE MODELLANTE	82	# PELLE BUCCIA D'ARANCIA DRENANTE
21	INTERNO BRACCIA MANTENIMENTO	51	ESTERNO COSCE MANTENIMENTO	83	# PELLE BUCCIA D'ARANCIA LEVIGANTE
22	# INTERNO BRACCIA URTO	52	# ESTERNO COSCE URTO	84	# PELLE BUCCIA D'ARANCIA MANTENIMENTO
23	# INTERNO BRACCIA MODELLANTE	53	# ESTERNO COSCE MODELLANTE	85	PELLE RUVIDA RIATTIVANTE
24	# INTERNO BRACCIA MANTENIMENTO	54	# ESTERNO COSCE MANTENIMENTO	86	PELLE RUVIDA LEVIGANTE
25	FIANCHI E SCHIENA URTO	55	INTERNO COSCE URTO	87	PELLE RUVIDA MANTENIMENTO
26	FIANCHI E SCHIENA MODELLANTE	56	INTERNO COSCE MODELLANTE	88	# PELLE RUVIDA RIATTIVANTE
27	FIANCHI E SCHIENA MANTENIMENTO	57	INTERNO COSCE MANTENIMENTO	89	# PELLE RUVIDA LEVIGANTE
28	# FIANCHI E SCHIENA URTO	58	# INTERNO COSCE URTO	90	# PELLE RUVIDA MANTENIMENTO
29	# FIANCHI E SCHIENA MODELLANTE	59	# INTERNO COSCE MODELLANTE		
30	# FIANCHI E SCHIENA MANTENIMENTO	60	# INTERNO COSCE MANTENIMENTO		
		61	GINOCCHIA URTO		
		62	GINOCCHIA MODELLANTE		


N° PROGRAMMA -TRATTAMENTO		N° PROGRAMMA -TRATTAMENTO	
91	SMAGLIATURE	126	CUOIO CAPELLUTO PULIZIA
92	# SMAGLIATURE	127	CUOIO CAPELLUTO ATTIVANTE
93	CICATRICI	128	# CUOIO CAPELLUTO STIMOLANTE
94	# CICATRICI	129	# CUOIO CAPELLUTO PULIZIA
95	MACCHIE DELLA PELLE	130	# CUOIO CAPELLUTO ATTIVANTE
96	# MACCHIE DELLA PELLE	131	VEICOLANTE ALTO
97	VENE VARICOSE	132	VEICOLANTE MEDIO
98	# VENE VARICOSE	133	VEICOLANTE BASSO
99	VISO ESFOLIANTE	134	# VEICOLANTE ALTO
100	VISO MASSAGGIO	135	# VEICOLANTE MEDIO
101	VISO LEVIGANTE	136	# VEICOLANTE BASSO
102	# VISO ESFOLIANTE	137	UOMO URTO
103	# VISO MASSAGGIO	138	UOMO MODELLANTE
104	# VISO LEVIGANTE	139	UOMO MANTENIMENTO
105	VISO AZIONE ANTI-AGE	140	# UOMO URTO
106	# VISO AZIONE ANTI-AGE	141	# UOMO MODELLANTE
107	VISO CONTORNO OCCHI	142	# UOMO MANTENIMENTO
108	# VISO CONTORNO OCCHI	159	TEST MANIPOLO
109	VISO TONIFICANTE		
110	# VISO TONIFICANTE		
111	COLLO TONIFICANTE		
112	# COLLO TONIFICANTE		
113	COLLO ANTIRUGHE		
114	# COLLO ANTIRUGHE		
115	DÈCOLLETÈ TONIFICANTE		
116	# DÈCOLLETÈ TONIFICANTE		
117	DÈCOLLETÈ ANTIRUGHE		
118	# DÈCOLLETÈ ANTIRUGHE		
119	DOPPIO MENTO RIDUZIONE		
120	# DOPPIO MENTO RIDUZIONE		
121	ACNE E BRUFOLI		
122	# ACNE E BRUFOLI		
123	TRATTAMENTO COUPEROSE		
124	# TRATTAMENTO COUPEROSE		
125	CUOIO CAPELLUTO STIMOLANTE		

PROGRAMMI ESTETICA E BENESSERE SPECIFICHE

CELLULITE GLUTEI

NUMERO PROGRAMMA E DURATA


n° 1	12 minuti
n° 2 T.E.L.I.™	20 minuti

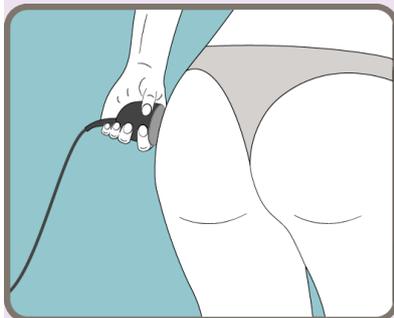

CELLULITE ARTI SUPERIORI

NUMERO PROGRAMMA E DURATA

n° 7	12 minuti
n° 8 T.E.L.I.™	20 minuti

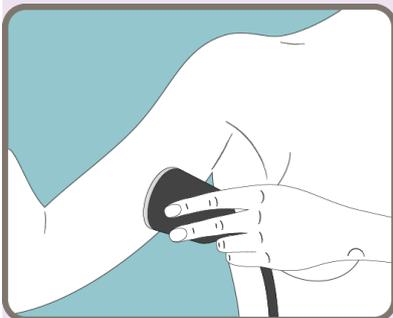


ESTERNO BRACCIA

NUMERO PROGRAMMA E DURATA

n° 13 URTO	12 minuti
n° 14 MODELLANTE	12 minuti
n° 15 MANTENIMENTO	12 minuti

T.E.L.I.™


n° 16 URTO	20 minuti
n° 17 MODELLANTE	20 minuti
n° 18 MANTENIMENTO	20 minuti

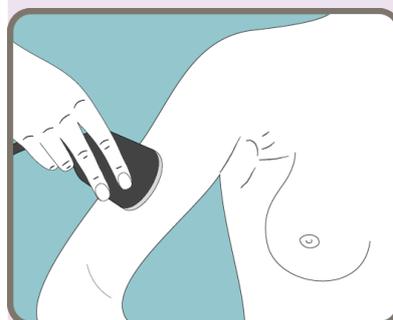

CELLULITE ADDOME

NUMERO PROGRAMMA E DURATA

n° 3	12 minuti
n° 4 T.E.L.I.™	20 minuti

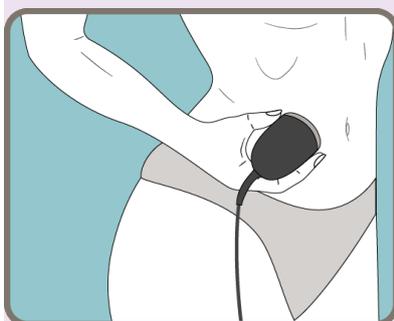

TESSUTO ADIPOSO

NUMERO PROGRAMMA E DURATA

n° 9	12 minuti
n° 10 T.E.L.I.™	20 minuti

Durante l'applicazione, far scorrere la testina sulla zona interessata con movimenti lenti e circolari interponendo del gel per ultrasuoni o una crema adatta al massaggio, tra la testina di trattamento e la superficie della cute.


INTERNO BRACCIA

NUMERO PROGRAMMA E DURATA

n° 19 URTO	12 minuti
n° 20 MODELLANTE	12 minuti
n° 21 MANTENIMENTO	12 minuti

T.E.L.I.™


n° 22 URTO	20 minuti
n° 23 MODELLANTE	20 minuti
n° 24 MANTENIMENTO	20 minuti

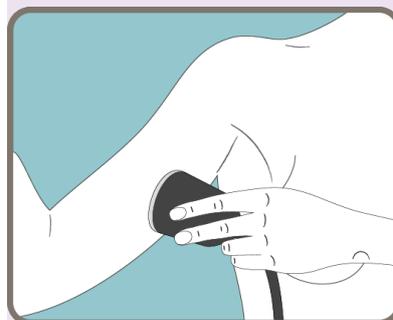

CELLULITE ARTI INFERIORI

NUMERO PROGRAMMA E DURATA

n° 5	12 minuti
n° 6 T.E.L.I.™	20 minuti

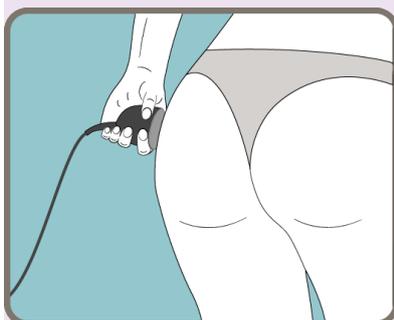


TONIFICAZIONE TESSUTI

NUMERO PROGRAMMA E DURATA


n° 11	12 minuti
n° 12 T.E.L.I.™	20 minuti

Durante l'applicazione, far scorrere la testina sulla zona interessata con movimenti lenti e circolari interponendo del gel per ultrasuoni o una crema adatta al massaggio, tra la testina di trattamento e la superficie della cute.


FIANCHI E SCHIENA	
NUMERO PROGRAMMA E DURATA	
n° 25 URTO	12 minuti
n° 26 MODELLANTE	12 minuti
n° 27 MANTENIMENTO	12 minuti
T.E.L.I.™	
n° 28 URTO	20 minuti
n° 29 MODELLANTE	20 minuti
n° 30 MANTENIMENTO	20 minuti

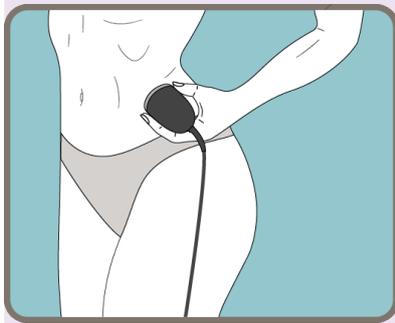


CULOTTES CHEVAL	
NUMERO PROGRAMMA E DURATA	
n° 37 URTO	12 minuti
n° 38 MODELLANTE	12 minuti
n° 39 MANTENIMENTO	12 minuti
T.E.L.I.™	
n° 40 URTO	20 minuti
n° 41 MODELLANTE	20 minuti
n° 42 MANTENIMENTO	20 minuti

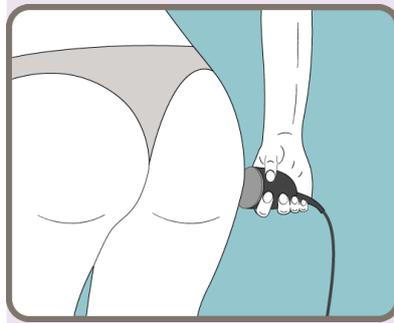


ESTERNO COSCE	
NUMERO PROGRAMMA E DURATA	
n° 49 URTO	12 minuti
n° 50 MODELLANTE	12 minuti
n° 51 MANTENIMENTO	12 minuti
T.E.L.I.™	
n° 52 URTO	20 minuti
n° 53 MODELLANTE	20 minuti
n° 54 MANTENIMENTO	20 minuti

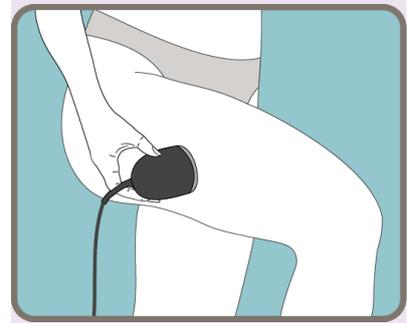


ADDOME	
NUMERO PROGRAMMA E DURATA	
n° 31 URTO	12 minuti
n° 32 MODELLANTE	12 minuti
n° 33 MANTENIMENTO	12 minuti
T.E.L.I.™	
n° 34 URTO	20 minuti
n° 35 MODELLANTE	20 minuti
n° 36 MANTENIMENTO	20 minuti

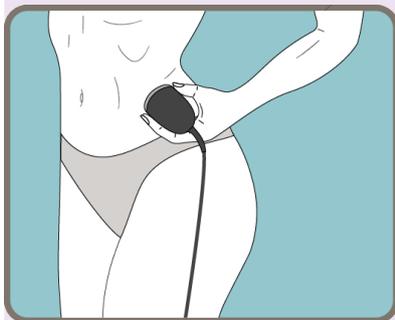


GLUTEI	
NUMERO PROGRAMMA E DURATA	
n° 43 URTO	12 minuti
n° 44 MODELLANTE	12 minuti
n° 45 MANTENIMENTO	12 minuti
T.E.L.I.™	
n° 46 URTO	20 minuti
n° 47 MODELLANTE	20 minuti
n° 48 MANTENIMENTO	20 minuti

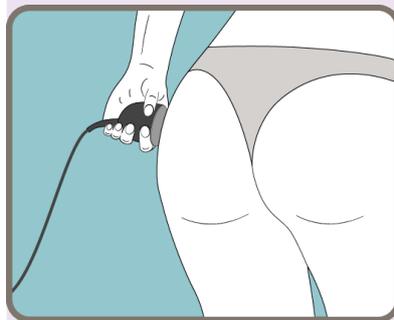


INTERNO COSCE	
NUMERO PROGRAMMA E DURATA	
n° 55 URTO	12 minuti
n° 56 MODELLANTE	12 minuti
n° 57 MANTENIMENTO	12 minuti
T.E.L.I.™	
n° 58 URTO	20 minuti
n° 59 MODELLANTE	20 minuti
n° 60 MANTENIMENTO	20 minuti

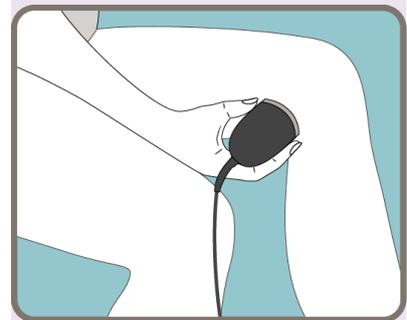


GINOCCHIA	
NUMERO PROGRAMMA E DURATA	
n° 61 URTO	12 minuti
n° 62 MODELLANTE	12 minuti
n° 63 MANTENIMENTO	12 minuti
T.E.L.I.™	
n° 64 URTO	20 minuti
n° 65 MODELLANTE	20 minuti
n° 66 MANTENIMENTO	20 minuti

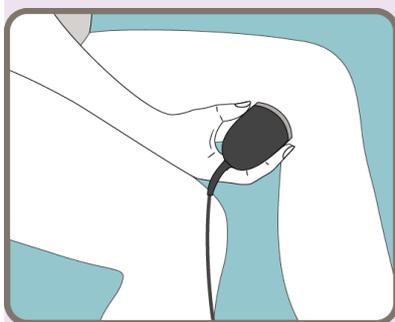


POLPACCI	
NUMERO PROGRAMMA E DURATA	
n° 73 URTO	12 minuti
n° 74 MODELLANTE	12 minuti
n° 75 MANTENIMENTO	12 minuti
T.E.L.I.™	
n° 76 URTO	20 minuti
n° 77 MODELLANTE	20 minuti
n° 78 MANTENIMENTO	20 minuti

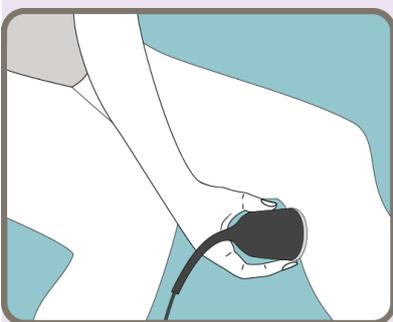


PELLE RUVIDA	
NUMERO PROGRAMMA E DURATA	
n° 85 RIATTIVANTE	12 minuti
n° 86 LEVIGANTE	12 minuti
n° 87 MANTENIMENTO	12 minuti
T.E.L.I.™	
n° 88 RIATTIVANTE	20 minuti
n° 89 LEVIGANTE	20 minuti
n° 90 MANTENIMENTO	20 minuti

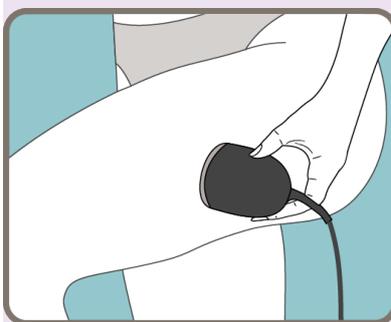

INTERNO GINOCCHIA	
NUMERO PROGRAMMA E DURATA	
n° 67 URTO	12 minuti
n° 68 MODELLANTE	12 minuti
n° 69 MANTENIMENTO	12 minuti
T.E.L.I.™	
n° 70 URTO	20 minuti
n° 71 MODELLANTE	20 minuti
n° 72 MANTENIMENTO	20 minuti

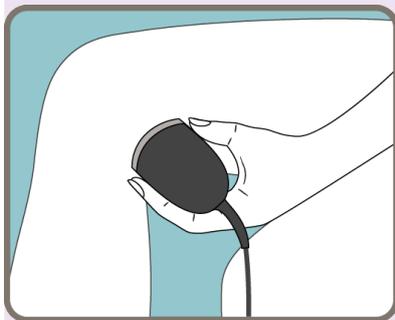

PELLE BUCCIA D'ARANCIA	
NUMERO PROGRAMMA E DURATA	
n° 79 DRENANTE	12 minuti
n° 80 LEVIGANTE	12 minuti
n° 81 MANTENIMENTO	12 minuti
T.E.L.I.™	
n° 82 DRENANTE	20 minuti
n° 83 LEVIGANTE	20 minuti
n° 84 MANTENIMENTO	20 minuti

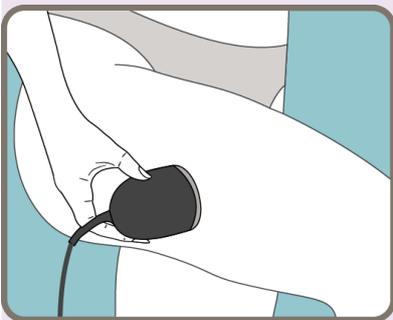

SMAGLIATURE	
NUMERO PROGRAMMA E DURATA	
n° 91	12 minuti
n° 92 T.E.L.I.™	20 minuti

Durante l'applicazione, far scorrere la testina sulla zona interessata con movimenti lenti e circolari interponendo del gel per ultrasuoni o una crema adatta al massaggio, tra la testina di trattamento e la superficie della cute.

CICATRICI

NUMERO PROGRAMMA E DURATA

n° 93	12 minuti
n° 94 T.E.L.I.™	20 minuti

Durante l'applicazione, far scorrere la testina sulla zona interessata con movimenti lenti e circolari interponendo del gel per ultrasuoni o una crema adatta al massaggio, tra la testina di trattamento e la superficie della cute.

MACCHIE DELLA PELLE

NUMERO PROGRAMMA E DURATA


n° 95	12 minuti
n° 96 T.E.L.I.™	20 minuti

Durante l'applicazione, far scorrere la testina sulla zona interessata con movimenti lenti e circolari interponendo del gel per ultrasuoni o una crema adatta al massaggio, tra la testina di trattamento e la superficie della cute.

VENE VARICOSE

NUMERO PROGRAMMA E DURATA

n° 97	12 minuti
n° 98 T.E.L.I.™	20 minuti

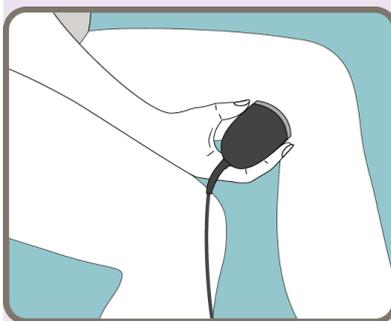


VISO

NUMERO PROGRAMMA E DURATA

n° 99 ESFOLIANTE	12 minuti
n° 100 MASSAGGIO	12 minuti
n° 101 LEVIGANTE	12 minuti

T.E.L.I.™

n° 102 ESFOLIANTE	20 minuti
n° 103 MASSAGGIO	20 minuti
n° 104 LEVIGANTE	20 minuti

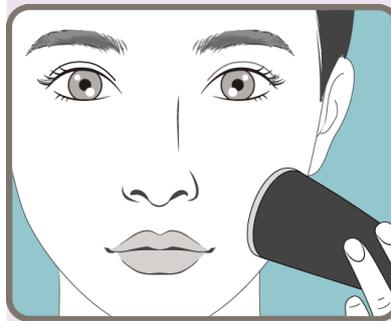

VISO AZIONE ANTI-AGE

NUMERO PROGRAMMA E DURATA

n° 105	12 minuti
n° 106 T.E.L.I.™	20 minuti



VISO CONTORNO OCCHI

NUMERO PROGRAMMA E DURATA


n° 107	12 minuti
n° 108 T.E.L.I.™	20 minuti



VISO TONIFICANTE

NUMERO PROGRAMMA E DURATA


n° 109	12 minuti
n° 110 T.E.L.I.™	20 minuti

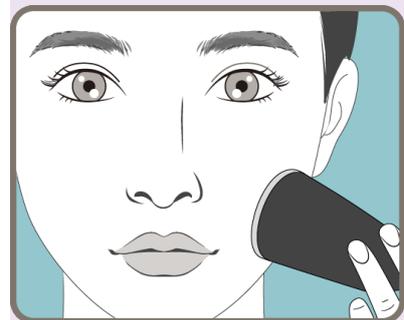

COLLO TONIFICANTE


NUMERO PROGRAMMA E DURATA

n° 111	12 minuti
n° 112 T.E.L.I.™	20 minuti

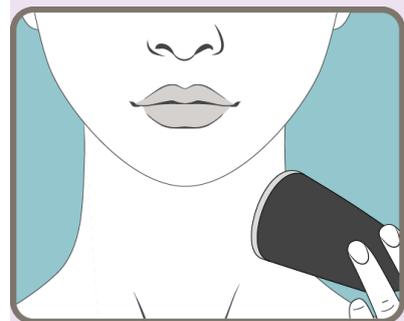


COLLO ANTIRUGHE

NUMERO PROGRAMMA E DURATA	
n° 113	12 minuti
n° 114 T.E.L.I.™	20 minuti

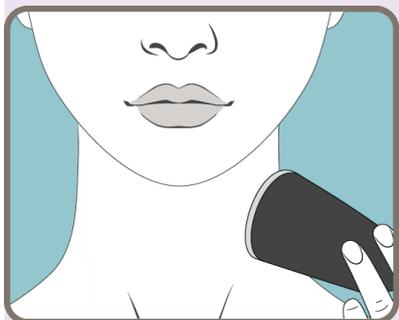

DOPPIO MENTO RIDUZIONE

NUMERO PROGRAMMA E DURATA	
n° 119	12 minuti
n° 120 T.E.L.I.™	20 minuti

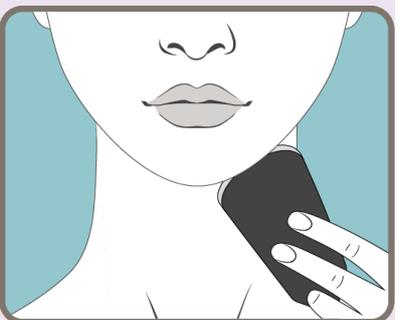


CUOIO CAPELLUTO

NUMERO PROGRAMMA E DURATA	
n° 125 STIMOLANTE	12 minuti
n° 126 PULZIA	12 minuti
n° 127 ATTIVANTE	12 minuti
T.E.L.I.™	
n° 128 STIMOLANTE	20 minuti
n° 129 PULZIA	20 minuti
n° 130 ATTIVANTE	20 minuti




DÈCOLLETÈ TONIFICANTE

NUMERO PROGRAMMA E DURATA	
n° 115	12 minuti
n° 116 T.E.L.I.™	20 minuti

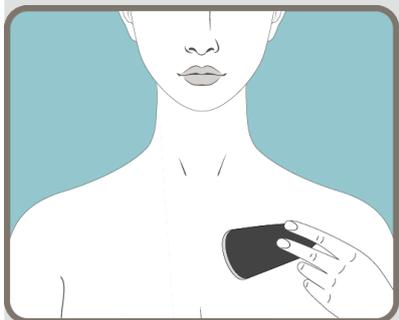


ACNE E BRUFOLI

NUMERO PROGRAMMA E DURATA	
n° 121	12 minuti
n° 122 T.E.L.I.™	20 minuti

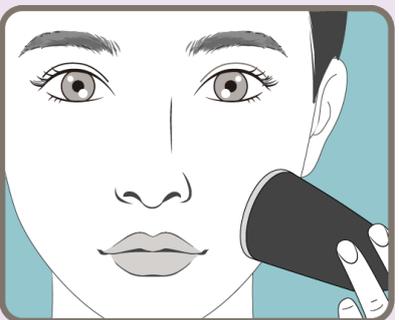


VEICOLANTE

NUMERO PROGRAMMA E DURATA	
n° 131 ALTO	12 minuti
n° 132 MEDIO	12 minuti
n° 133 BASSO	12 minuti
T.E.L.I.™	
n° 134 ALTO	20 minuti
n° 135 MEDIO	20 minuti
n° 136 BASSO	20 minuti

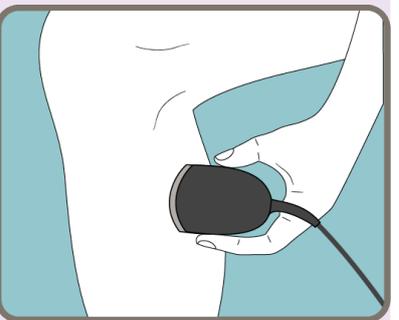


DÈCOLLETÈ ANTIRUGHE

NUMERO PROGRAMMA E DURATA	
n° 117	12 minuti
n° 118 T.E.L.I.™	20 minuti

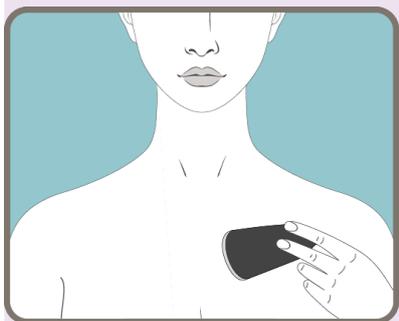

TRATTAMENTO COUPEROSE


NUMERO PROGRAMMA E DURATA	
n° 123	12 minuti
n° 124 T.E.L.I.™	20 minuti

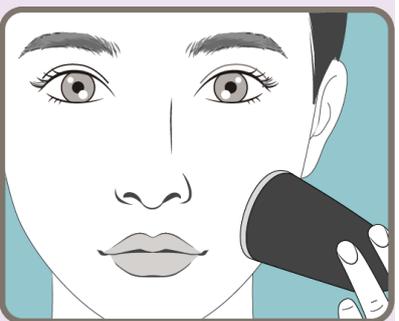

UOMO

NUMERO PROGRAMMA E DURATA

n° 137 URTO	12 minuti
n° 138 MODELLANTE	12 minuti
n° 139 MANTENIMENTO	12 minuti
T.E.L.I.™	
n° 140 URTO	20 minuti
n° 141 MODELLANTE	20 minuti
n° 142 MANTENIMENTO	20 minuti

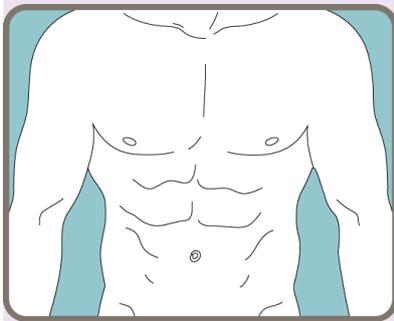

MESIS 

Stampato in Italia

Distribuito da Vima s.r.l. Via Condove 11, 10129, Torino, Italy
email: assistentatecnica@mesis.eu - www.mesis.eu